

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ve HASTALAR İÇİN GÜVENLİKTE YENİ STANDART

Tedaviyi uygulamak için standart prosedürü kullanınız.

Enjektörü kurumunuzun politikasına uygun olan aseptik tekniği ile hazırlayınız ve enjekte ediniz.

İğne, hastanın içindeyken pistonu basarak geri çekme mekanizmasını harekete geçiriniz.

VanishPoint enjektörü uygun olan tıbbi atık kovasına atınız.



1

2

3

4

the VANISHPOINT® ADVANTAGE

VanishPoint enjektörleri doğru doz ayarlamasına imkan verir

İğne, dizaynından dolayı hasta konforunu sağlar

TEK ELLE KOLAY KULLANIM

KONTAMİNE OLMUŞ İĞNEYE MARUZ BIRAKMAZ

EFEKTİF TIBBİ ATIK KULLANIMI SAĞLAR

Hasta içinde aktif olan sistem, kontaminasyona maruz kalmayı önler

Enjektöre sabitlenmiş iğne, sızıntı ve kontaminasyonu önler

VanishPoint enjektörlerinin farklı boyarlarda iğne çeşitliliği mevcuttur, iğne boylarına göre renk kodlaması yapılmıştır

Kullanmayı VanishPoint enjektörler diğer enjektörlere göre daha az atık alanı kaplar ve atıklardan kaynaklanan yaralanmayı önler

Güvenli bir şekilde iğneyi kan alma tüp tutucusuna takınız. Kullanmaya hazır olduğunda iğnenin koruyucu kabını çıkarınız.

Kurum protokolüne uygun şekilde damara giriş yapınız.

Kan alma işleminin sonunda son tüpü çıkarıp iğne hala hasta damarının içindeyken tüp tutucusunun arkasındaki kapağı kapatınız.

Kurumun protokolüne göre tüp tutucusunu uygun tıbbi atık kovasına atınız.



1

2

3

4

the VANISHPOINT® ADVANTAGE

Sağlık Çalışanları ve Hasta Güvenliği İçin Dizayn Edilmiştir

Tüp tutucusunun arkasındaki kapak esnekliği sayesinde her pozisyonda rahatlıkla kapatılabilir

Şeffaf mavi tüp tutucusu kan gelişiminin kolaylıkla görülmesini sağlar

Standart kan alma iğneleriyle uyumludur

Hastadan direkt olarak tüp tutucusuna çekilen iğne kontaminasyona maruz kalmayı önler

Güvenlik mekanizması aktive edilirken, kullanıcının iki elinin iğnenin arkasında kalmasını sağlar

Kullanıcıyı iki taraftaki kontamine iğneden korur

Kanın gelişini görerek venipunktür işlemini gerçekleştirin. Kateteri yavaşça damarın içine doğru itin.

Gövdeyi sabit tutarak, giriş iğnesini tanıtıcı piminden ayırın. Kateteri işaret parmağınızla damara doğru ilerletin.

Giriş iğnesini kateterden geri çekmeden, renk kodlu olan pistonun sonuna tam basarak otomatik geri çekme mekanizmasını aktif hale getirin.

Giriş iğnesi, kateterden çıkartılmadan otomatik geri çekilme mekanizması ile iğne yuvasına geri çekilir. İşlem sonunda uygun tıbbi atık kovasına atınız.



1

2

3

4

the VANISHPOINT® ADVANTAGE

VanishPoint Patentli Geri Çekme Özelliğine Sahip Güvenlikli IV Kateter

Ana gövdenin şeffaf olması, iğnenin görünürlüğünü sağlar

İğne ucu dizaynından dolayı giriş iğnesi hasta konforu ve kullanımı kolaylığı sağlar

Kateter yuvası ve piston sonu, standart renk kodlamasına uygundur

Pistonun sonuna basıldığında geri çekme mekanizması çalışır, iğne geri çekilmiş olur. Bir kez aktive olduğunda, iğne güvenli bir şekilde içeri çekilir, iğne batması yaralanmalarını ortadan kaldırır.